


eFONA⁽¹⁾ in CICO Situation

Gemäß aktuellen DAS⁽²⁾ Leitlinien

Kompaktes und leichtes Set

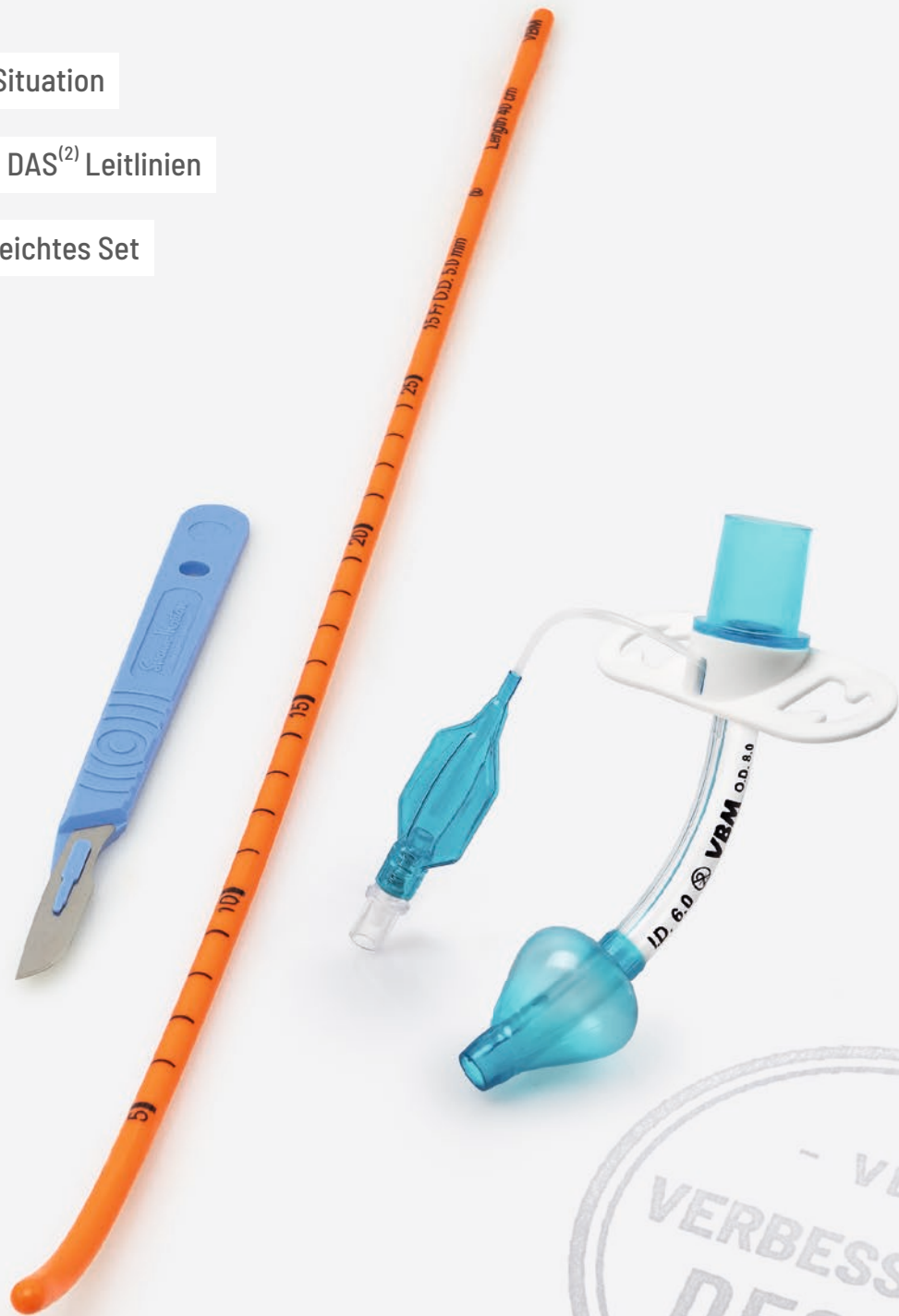

ScapelCric[®]


Set für die chirurgische Koniotomie entsprechend der Skalpellechnik

/ ScalpelCric®

ScalpelCric® ist ein chirurgisches Koniotomie-Set entsprechend der Skalpelltechnik. Das Set wurde gemäß den aktuellen Empfehlungen der DAS (Difficult Airway Society) Guidelines entwickelt.

Basierend auf der einfachen Beschreibung „**Stichinzision, Drehung, Bougie, Tubus**“ kann mit der ScalpelCric® eine eFONA (emergency Front Of Neck Access) in einer CICO Situation (Cannot Intubate – Cannot Oxygenate) schnell durchgeführt werden. Das Set ist in einer speziellen sterilen Instrumententasche verpackt, in der die Komponenten nach Reihenfolge ihrer Anwendung sortiert sind. Dies kann in der kritischen Zeit der Anwendung wichtig sein.

Anwendung

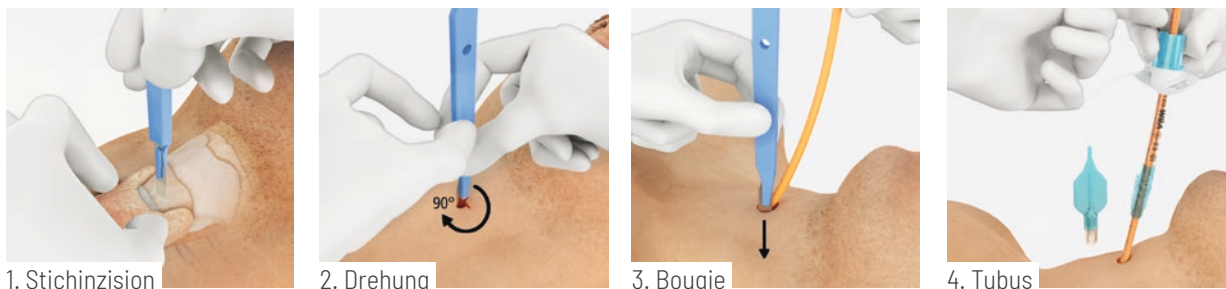

1. Stichinzision

2. Drehung

3. Bougie

4. Tubus

Eigenschaften

Skalpell

- Die Größe 10 des Skalpells ist ideal für den Außendurchmesser des Trachealtubus

Bougie

- Geringe Reibungsfläche zum einfachen Einführen des Tubus
- Abgewinkelte und abgerundete Spitze
- Zentimetermarkierungen zur Kontrolle der Einführtiefe

6.0 mm I.D. Tubus

- Cuff, zum Schutz vor Aspiration
- Anatomischer Flansch
- Atraumatische, abgerundete Tubusspitze
- Sanfter Übergang zwischen Bougie und Tubus


Verlängerungsschlauch

- Mit Absaugmöglichkeit ≤ 16 Fr
- Zur Zugentlastung



Halsband

- Sichere Fixation des Tubus

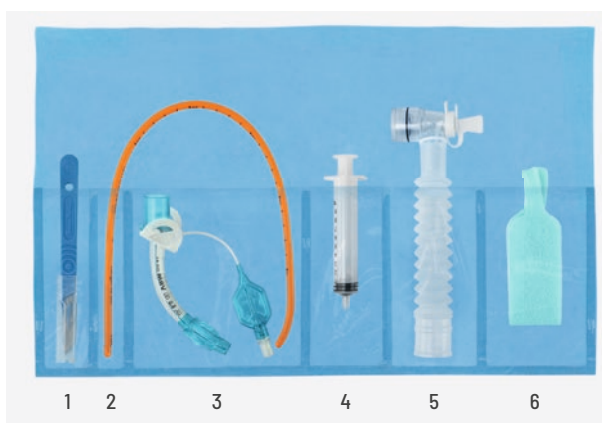

Inhalt

- 1 Skalpell #10
- 2 15 Fr Bougie, 40 cm
- 3 6.0 mm I.D. Tubus mit Cuff
- 4 Spritze 10 ml
- 5 Verlängerungsschlauch
- 6 Halsband

Verpackung

- Robuste Verpackung und kompaktes Packmaß 26,0 (L) x 14,5 (B) x 3,5 (H) cm für Notfalltaschen, Rucksäcke, Notfallwagen, etc.
- Öffnungspfeile zum einfachen Öffnen
- Sterile Umverpackung ist wasserresistent

Bestellinformation

ScalpelCric® / Zum Einmalgebrauch, steril

REF Stk. / Box

30-08-447-1 1

Zusatzinformation



Anwendungsvideo



Flyer Koniotomie



Kommentierte Bibliografie

Dieses Produkt ist hergestellt ohne die Verwendung von Naturkautschuklatex, wenn nicht anders gekennzeichnet. Dieses Produkt enthält keine kennzeichnungspflichtigen Phthalate gemäß CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

(1) emergency Front Of Neck Access
(2) Difficult Airway Society