

eFONA<sup>(1)</sup> en situación NINO

Acorde a las últimas recomendaciones de la DAS<sup>(2)</sup>

Kit compacto y ligero



## ScapelCric<sup>®</sup>

Kit para la cricotirotomía quirúrgica de acuerdo con la técnica con bisturí

# / ScalpelCric®

ScalpelCric® es un kit de cricotirotomía quirúrgico de acuerdo con la técnica con bisturí. El kit se ha desarrollado de acuerdo con las recomendaciones actuales de la DAS (Difficult Airway Society).

Basándose en la sencilla descripción "incisión, giro, bougie, tubo", el ScalpelCric® puede utilizarse para realizar rápidamente un eFONA (emergency Front Of Neck Access) en una situación NINO (No Intubable - No Oxigenable). El kit se presenta en una bolsa estéril específica, con cada componente colocado en el orden de su uso. Esto es muy importante en el momento crítico de la aplicación.


## Uso




1. Incisión



2. Giro

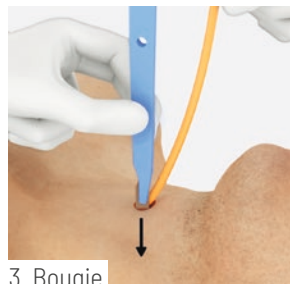

3. Bougie

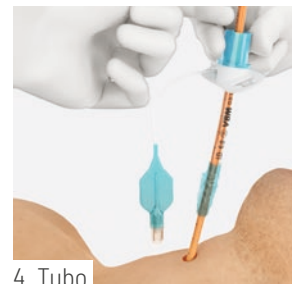

4. Tubo

## Características

### Bisturí

- El tamaño 10 del bisturí, es el tamaño ideal para adaptarse al diámetro exterior del tubo

### Bougie

- Superficie de baja fricción para facilitar la inserción del tubo
- Punta angular y redondeada
- Marcas de centímetros para comprobar la profundidad de inserción

### Tubo con 6.0 mm D.I.

- Balón para la protección contra aspiración
- Soporte de fijación anatómica
- Punta redondeada y atraumática
- Transición suave entre bougie y tubo


### Tubo de prolongación

- Con la posibilidad de succión ≤ 16 Fr
- Para reducir la tensión



### Collarín

- Para una fijación segura del tubo

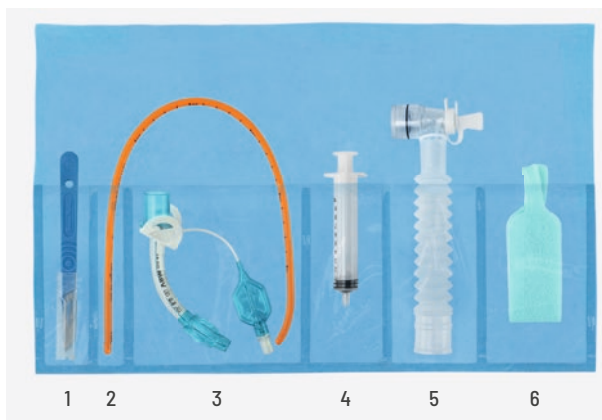

### Contenido

- 1 Bisturí #10
- 2 Bougie 15 Fr, 40 cm
- 3 Tubo con balón, 6.0mm D.I.
- 4 Jeringa de 10 ml
- 5 Tubo de prolongación
- 6 Collarín

### Embalaje

- Embalaje resistente y tamaño compacto 26,0 (L) x 14,5 (A) x 3,5 (A) cm para el uso en bolsas de emergencias, mochilas, carros de emergencia, etc.
- Símbolos de flechas para facilitar la apertura
- La bolsa estéril es resistente al agua

## Informaciones de pedido

ScalpelCric® / De un solo uso, estéril

REF Cant. / Box

30-08-447-1 1

## Informaciones adicionales



Vídeo explicativo



Flyer cricotirotomía



Bibliografía comentada

Este producto está fabricado sin la utilización de látex de caucho natural, salvo que se especifique lo contrario. Este producto no contiene ftalatos que requieran una identificación según la regulación CLP (EC) 1272/2008.

(1) emergency Front Of Neck Access  
(2) Difficult Airway Society