

Línea de posicionamiento para una aplicación correcta

Fijación de rodillas incluida

3 tamaños disponibles




Cinturón pélvico

Sistema neumático para la estabilización de fractura pélvica

/ Cinturón pélvico

El cinturón pélvico es un estabilizador pélvico no invasivo externo para la compresión y la estabilización de fracturas de la pelvis inestables. Los manguitos inflables ejercen una presión lateral sobre la pelvis, que sirve para estabilizar externamente el anillo pélvico y restablecer las condiciones anatómicas. La hemorragia interna se reduce mediante la reducción del volumen intrapélvico.

Características

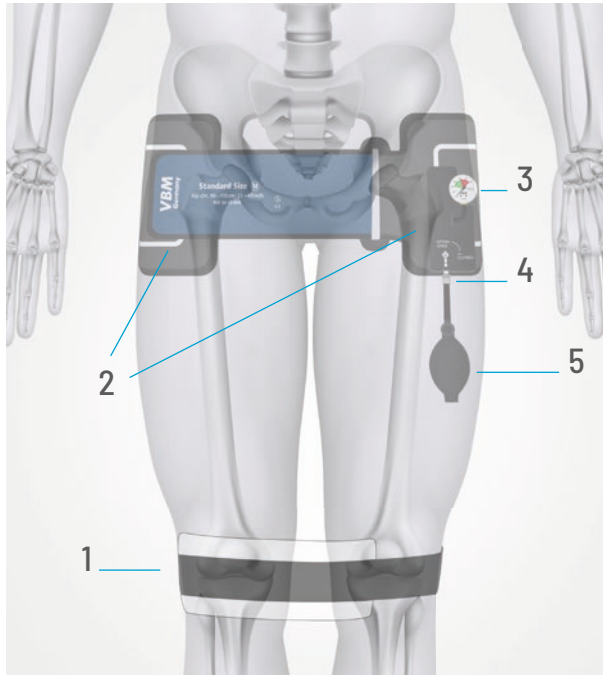

Cinturón pélvico en posición, con placa de fijación, para la fijación de rodilla.

1 Pasador y fijador

- Para deslizar el cinturón pélvico por debajo de la pelvis del paciente
- Después de extraer, utilizar como fijador de rodilla

2 Manguitos

- Los manguitos inflables ejercen una presión lateral sobre la pelvis
- Manipulación mecánica mínima sobre la fractura pélvica

3 Manómetro

- Control visual de la presión

4 Llave de paso

- Para un transporte sin fugas

5 Pera de inflado

- Para el inflado y desinflado de los manguitos
- Extraíble para el uso en la RM



Posicionamiento

- La línea de posicionamiento a la altura del trocánter mayor facilita la aplicación correcta del cinturón pélvico
- El pasador de deslizamiento facilita la aplicación del cinturón pélvico y puede ayudar a recordar la importante rotación interna de las extremidades inferiores

Informaciones de pedido

Cinturón pélvico / De un solo uso

Tamaño	Paciente	Perímetro cadera	REF	Box
S	Junior	70 - 90 cm	34-10-006	1
M	Standard	90 - 110 cm	34-10-004	1
L	Large	110 - 140 cm	34-10-005	1

El cinturón pélvico viene en un embalaje compacto y listo para usar.

Dimensión embalaje:

42 cm (L) x 19 cm (A) x 7 cm (A)

Informaciones adicionales



Vídeo explicativo



Bibliografía comentada

Este producto está fabricado sin la utilización de látex de caucho natural, salvo que se especifique lo contrario.
Este producto no contiene ftalatos que requieran una identificación según la regulación CLP (EC) 1272/2008.