

Punta preformada y redondeada

Solución ideal para problemas de espacio

Con solo 3 clics pasa de 20 a 65 cm



## Pocket Introducer

Introducer con el embalaje más pequeño para facilitar una intubación difícil

# / Pocket Introducer

Pocket Introducer es una ayuda para la vía aérea difícil, para facilitar la intubación orotraqueal durante una laringoscopia directa o la intubación mediante una videolaringoscopia. El introduductor de 15 Fr con punta preformada y marcas de centímetros, se puede desplegar de 20 a 65 cm con solo 3 clics, por lo que en pocos segundos está listo para su uso.

Una vez plegado, el introduductor provee el embalaje más pequeño y es la solución ideal para los espacios en bolsas de emergencia, helicópteros, batas de médicos, carros de emergencia, etc.


## Uso



Una vez plegado, el Pocket Introducer mide 20 cm.



Despliegue el Pocket Introducer.

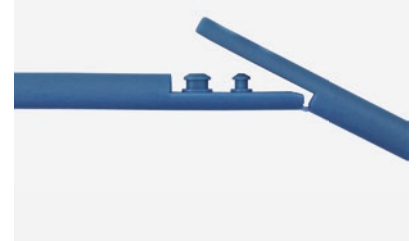

Presione firmemente todas las conexiones de clic.



Las conexiones de clic son permanentes y no se pueden volver a separar.



Si es necesario, doble el extremo distal.



La punta preformada y redondeada es atraumática.



Desplegado a 65 cm, el Pocket Introducer está listo para su uso.

## Informaciones de pedido

**Pocket Introducer** / De un solo uso, estéril

Tamaño	Longitud	Marcas de centímetros	Para tubo traqueal	REF	Box
15Fr	65 cm	10 a 40 cm	≥ 6.0 mm D.I.	33-80-650-1	5

**Pocket Introducer** / En un envase de plástico rígido, de un solo uso, estéril

Tamaño	Longitud	Marcas de centímetros	Para tubo traqueal	REF	Box
15Fr	65 cm	10 a 40 cm	≥ 6.0 mm D.I.	33-81-650-1	1

## Informaciones adicionales



Vídeo explicativo



Flyer dispositivos de intubación



Bibliografía comentada



Envase de plástico

Este producto está fabricado sin la utilización de látex de caucho natural, salvo que se especifique lo contrario.  
Este producto no contiene ftalatos que requieran una identificación según la regulación CLP (EC) 1272/2008.