

eFONA* en situación CICO

Todos los componentes en un kit

Envase compacto




Surgicric II

Kit para la cricotirotomía quirúrgica de acuerdo a la técnica quirúrgica clásica

Surgicric II

Surgicric II es un kit para la cricotirotomía quirúrgica de acuerdo a la técnica quirúrgica clásica. El kit permite asegurar la vía aérea en caso de una obstrucción de la vía aérea superior, respectivamente como "Ultima Ratio" si todos los demás intentos de ventilar al paciente fallan. La característica especial del Surgicric II es la combinación de tubo y dilatador. El dilatador preinsertado en el tubo permite un procedimiento rápido y sencillo. Envasado en una bolsa estéril específica, el kit ofrece una visión clara de todos los componentes.

Uso

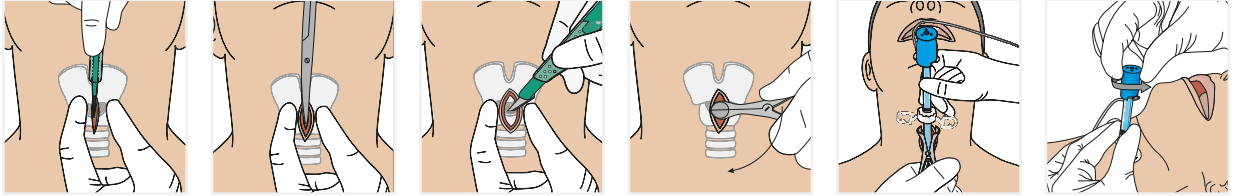

1. Incisión vertical en la piel

2. Disección roma

3. Incisión horizontal a través de la membrana cricotiroides

4. Introducir el espéculo y girar a 90°

5. Introducir el tubo a través del espéculo en la tráquea

6. Desbloquear y retirar el dilatador

Características

Tijeras

- Para la disección roma hasta la membrana cricotiroides

Espéculo y gancho traqueal

- Para mantener la incisión abierta

Dilatador

- Punta blanda para evitar lesiones en la pared traqueal posterior
- Transición suave entre el dilatador y la punta del tubo
- El mecanismo de bloqueo reduce el riesgo de dislocación accidental del dilatador y del tubo

Tubo con 6.0 mm D.I.

- Balón para la protección contra la aspiración
- Fijación móvil
- Punta atraumática y redondeada

Tubo de prolongación

- Con posibilidad de aspiración ≤ 16 Fr

Collarín

- Fijación segura del tubo



Contenido

- 1 Bisturí # 11
- 2 Jeringa 10 ml
- 3 Tubo con balón con 6.0 mm D.I. y dilatador
- 4 Collarín
- 5 Tubo de prolongación
- 6 Gancho traqueal
- 7 Tijeras
- 8 Espéculo

Embalaje robusto y compacto para el uso en bolsas de emergencias, mochilas, carros de emergencia.

Dimensión embalaje:

31.5 cm (L) x 15.2 cm (A) x 5.0 cm (A)

Dimensión desplegada / campo estéril:

56 cm (L) x 39 cm (A)

Informaciones de pedido

Surgicric II / De un solo uso, estéril

| REF | Box |
|-------------|-----|
| 30-08-117-1 | 1 |

Informaciones adicionales



Video explicativo



Flyer cricotirotomía



Bibliografía comentada

* emergency Front Of Neck Access

Este producto está fabricado sin la utilización de látex de caucho natural, salvo que se especifique lo contrario.
Este producto no contiene ftalatos que requieran una identificación según la regulación CLP (EC) 1272/2008.