

eFONA* en situation CICO

Tous les composants dans un seul kit

Emballage compact




Surgicric II

Kit pour la coniotomie chirurgicale selon la technique chirurgicale classique

Surgicric II

Surgicric II est un kit pour la coniotomie chirurgicale selon la technique chirurgicale classique. Le kit permet de sécuriser les voies aériennes en cas d'obstruction des voies aériennes supérieures ou en dernier recours, lorsque toutes les autres tentatives de ventilation du patient ont échoué. Une caractéristique particulière du Surgicric II est la combinaison du tube et du dilateur. Le dilateur est déjà inséré dans le tube, ce qui permet une procédure rapide et facile. Emballé dans une poche à instruments stérile spéciale, le kit offre une vue d'ensemble claire de tous les composants.

Utilisation

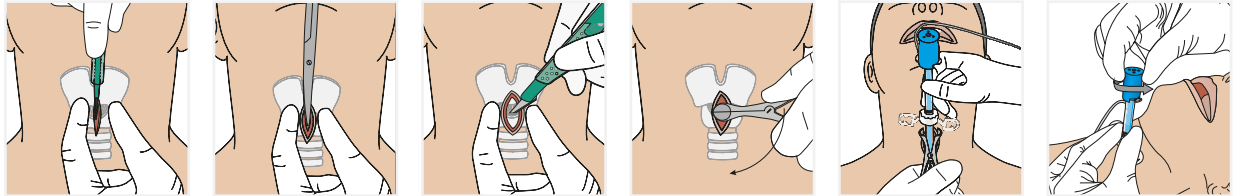

1. Incision cutanée verticale

2. Dissection mousse

3. Incision horizontale de la membrane cricothyroïdienne

4. Insérer le spéculum et le tourner de 90°

5. Insérer le tube dans la trachée via le spéculum

6. Débloquer et retirer le dilateur

Caractéristiques

Ciseaux

- Pour dissection mousse de la membrane cricothyroïdienne

Speculum et crochet trachéal

- Pour maintenir l'incision ouverte

Dilatateur

- Extrémité souple pour éviter les lésions de la paroi trachéale postérieure
- Ajustage fin entre dilateur et extrémité du tube
- Mécanisme de verrouillage pour éviter les déconnexions intempestives entre dilateur et tube

Sonde D.I. 6.0 mm

- Ballonnet pour la protection des inhalations
- Colerette de fixation mobile
- Atraumatique, extrémité arrondie du tube

Tube d'extension

- Avec aspiration possible ≤ 16 Fr

Lanière

- Fixation sécurisée du tube



Contenu

- 1 Scalpel # 11
- 2 Seringue 10 ml
- 3 Sonde à ballonnet D.I. 6.0 mm avec dilateur
- 4 Lanière
- 5 Tube d'extension
- 6 Crochet trachéal
- 7 Ciseaux
- 8 Spéculum

Emballage robuste et compact pour s'adapter aux sacs et chariots d'urgence etc.

Dimension emballage :

31.5 cm (L) x 15.2 cm (l) x 5.0 cm (H)

Dimension déplié / champ stérile :

56 cm (L) x 39 cm (l)

Informations pour commander

Surgicric II / Usage unique, stérile

REF	Box
30-08-117-1	1

Information supplémentaire



Vidéo d'application



Flyer coniotomie



Bibliographie commentée

* emergency Front Of Neck Access

Ce dispositif est fabriqué sans utiliser de latex de caoutchouc naturel, sauf indication contraire.

Ce dispositif ne contient aucun phtalate qui nécessite un étiquetage au titre du règlement CLP (CE) 1272/2008.